

未然に
防ごう!

福祉用具のヒヤリハット

Vol.19 介助用車いす

【ヒヤリ事例】

事例
1

傾斜のある所で介助者がブレーキをかけず放置してしまったため、車いすが動き出してしまった

事例
2

利用者の指がタイヤとブレーキの間に入ったまま、介助者は気づかずブレーキをかけてしまった

事例
3

車いす利用者がずっこけ姿勢のまま介助者が食事介助をしていたので、誤嚥しそうになった

【再発を防止するには…】

- ・平坦な道でもブレーキをかける癖を付けておく
- ・車いすは目視できない位置に停めない
- ・ブレーキが故障していないか確認しておく

- ・腕が肘掛から落ちないように気を付けておく
- ・ブレーキをかけるときはしっかり目視する
- ・ブレーキの根元には指が入るすき間があるということを理解しておく

- ・食事介助はなるべく椅子に座り替える
- ・無理な場合、体格に合った車いすを使用する
- ・利用者が上半身をしっかりと起こし、顎を引いている状態を確認して食事介助をする

ヒヤリハットや事故が起こる背景には、「利用者による要因」「介助者による要因」「環境による要因」があり、必ずしも福祉用具が原因で起こるものではありません。要因を見直し、正しく福祉用具を使用し、大きな事故やけがの防止になればと思います。



～おすすめ商品のご案内～



ミキ

M-1 スタンダード介助型ミキ

- スタンダード車いす
- タイヤは、クッション性が高い快適な乗り心地のエアタイヤ
- ブレーキは、タイヤに対して面で押しつけるのでガッチリホールド

■ 車椅子以外：250点～ ■

TAISコード:00122-000332 品番:RMPCN-46JD

その他さまざまな介助用車いすがございますので、お客さまの環境に合わせてお選びください。

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>

発行日：R3.08.15 有効期間：R3.11.30