

長く安全にご使用  
いただくために

# ご使用時の注意事項

タイカ

アルファプラ  
すくっとRe

品番 R532-325

TAISコード 00221-000507



## ご注意ください

心臓マッサージ等、身体に力を加える処置でのご使用はお控えください。

力が分散し適切な処置ができない可能性があります。

本商品に人を乗せたまま移動させないでください。

落下して怪我をする恐れがあります。

ベッドサイドレール、介助バー等と、本商品とのすき間に手などを挟まれないようにご注意ください。

怪我をする恐れがあります。

表と裏を間違えて使用されると、本商品の性能が十分に発揮されませんのでご注意ください。

本商品の上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。

効果的に減圧されない可能性があります。

本商品の端を強くつかまないでください。

内部がちぎれる場合があります。  
持ち運びや移動時には、両手で挟みこむようにしてください。

本商品をマットレス洗浄機やオートクレーブ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。

火または温度の高いものに近づけないでください。

火災の危険があります。

本商品を折り曲げないでください。



内部構造が破損する可能性があります。

※詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり  
TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602  
大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1  
<https://himawari-kumamon.com/>