

未然に  
防ごう!

# 福祉用具のヒヤリハット

Vol.9 車いす用クッション編

## 【ヒヤリ事例】

事例  
1

前後の傾斜がついていたクッションを、前後反対に置いていたためズレ落ちそうになった

事例  
2

サイズの合っていないクッションを使用して、空気注入口が太もも裏にあたったまま長時間車いすに座っていたため炎症が起きた

事例  
3

失禁で汚すことを気にして、納品後のクッションにビニールカバーをしていたため、お尻が滑り、ズレ落ちそうになった

## 【再発を防止するには…】

- ・利用者や介護者がクッションに傾斜があることを理解しておく
- ・「見ればわかる」と思いこまず、置く時はきちんと確認する

- ・使用している車いすに合ったクッションを使う
- ・クッションの位置がずれていないか確認する
- ・福祉用具に詳しい人にアドバイスをもらう

- ・ビニールは滑るという認識を持つ
- ・借りものだから汚してはいけない、と気を使いすぎないようにする

ヒヤリハットや事故が起こる背景には、「利用者による要因」「介助者による要因」「環境による要因」があり、必ずしも福祉用具が原因で起こるものではありません。要因を見直し、正しく福祉用具を使用し、大きな事故やけがの防止になればと思います。



～おすすめ商品のご案内～

ユーキトレーディング

## リフレックス

- 座るだけで空気の量を自動調整
- 固めと、中程度の固さのウレタンを使用することで、利用者のお尻にフィットしやすい
- 小柄な方から大柄な方まで幅広いサイズ展開

レンタル可能



TAISコード:00468-000034 品番:R735001

その他さまざまな車いす用クッションがございますので、お客さまの環境に合わせてお選びください。

事業所No:4372300915

# 有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>