

未然に
防ごう!

福祉用具のヒヤリハット

Vol.17スライディングシート

【ヒヤリ事例】

事例
1

スライディングシートを使用後、利用者の体から引き抜こうとしてシートごと落としそうになった

事例
2

スライディングシートを敷いたまま利用者を頭上へ動かし、勢いがついて頭がベッドボードにぶつかった

事例
3

スライディングシートをそのままにして介助から離れてしまい、利用者がスライディングシートごと落ちそうになった

【再発を防止するには…】

- ・用具の正しい使い方を身につける
- ・介助動作を正しく行う
- ・無理やりの介助を行わない

- ・スライディングシートの特性を理解しておく
- ・なれない福祉用具を使う際は、製品の特長を理解しておき、事前に練習を行う

- ・スライディングシートを使ったら片付ける
- ・スライディングシートの特性を理解しておく
- ・事故の危険を予測しておく

ヒヤリハットや事故が起こる背景には、「利用者による要因」「介助者による要因」「環境による要因」があり、必ずしも福祉用具が原因で起こるものではありません。要因を見直し、正しく福祉用具を使用し、大きな事故やけがの防止になればと思います。



～おすすめ商品のご案内～



タイカ

スマイルシート

- 体位変換や移動をスムーズにしてくれます
- パラシュート用の生地を使用しているため、滑りが良く丈夫です
- 洗濯・清拭消毒が可能です



TAISコード:00563-000052 品番:RCS-SMHL

その他さまざまなスライディングシートがございますので、お客様の環境に合わせてお選びください。

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>