

未然に
防ごう!

福祉用具のヒヤリハット

Vol.18移動用リフト

【ヒヤリ事例】

事例
1

腕を外に出すトイレ用と中に入れる
ベッド用のスリングシートを使い分
けていたが間違えてしまい腕をシー
トに引っ掛けさせてしまった

事例
2

利用者を乗せてる最中スリングシー
トがリフトのフックから突然はずれ
転落しそうになった

事例
3

吊り具の装着がうまくいっていな
いまま利用者を乗せて動かしたた
め脇を圧迫させていた

【再発を防止するには…】

- ・介護者に使用方法の研修を行っておく
- ・使用するスリングシートを1種類にする
- ・リフトを使用しない環境に整える

- ・フックにスリングシートのベルトをきちんとか
けていても姿勢調整等でベルトが緩み外れるこ
とがあるということを把握しておく
- ・ハンガーの形状を見直す

- ・装着は丁寧にする
- ・しわが寄ったまま装着すると痛みが生じるとい
うことを把握しておく

ヒヤリハットや事故が起こる背景には、「利用者による要因」「介助者による要因」「環境による要因」があり、必ずしも福祉用具が原因で起こるものではありません。要因を見直し、正しく福祉用具を使用し、大きな事故やけがの防止になればと思います。



～おすすめ商品のご案内～

介護保険購入品



モリトー

スリングパオ ハーフタイプ

- 着脱の手間をなくしたスリングシート
- 首や体幹の支持力が比較的しっかりした方向け
- 通気性と体圧分散性機能により床ずれ予防効果があります

TAISコード:00229-000020 品番:PAO100

その他さまざまな移動用リフトがございますので、お客さまの環境に合わせてお選びください。

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>