

未然に
防ごう!

福祉用具のヒヤリハット

Vol.12 トイレ用手すり

【ヒヤリ事例】

事例
1

手すりのトイレ固定部のネジが緩んできていたため、立ち上がる際にトイレから外れかけた

事例
2

介助者が操作する車いすに座っており、工事不要の便器固定型手すりの脚に車いすがぶつかった為転倒しかけた

事例
3

ひじ掛けのないポータブルトイレに取り付けたポータブルトイレ用手すりがうまく固定できておらず使用するたび動いて転倒しかけた

【再発を防止するには…】

- ・固定できる便器の形状やトイレの広さをきちんと確認して取り付ける
- ・定期的な点検を行う
- ・少しでも緩みに気づいた時点でネジを締める

- ・狭いトイレ内では車いすを慎重に押す
- ・トイレ内での介助の仕方を介助者へ指導する
- ・安定した座位を保てる車いすの環境にする


- ・使用しているポータブルトイレにきちんとあった手すりを導入する
- ・始めから手すり付きのポータブルトイレを導入しておく

ヒヤリハットや事故が起こる背景には、「利用者による要因」「介助者による要因」「環境による要因」があり、必ずしも福祉用具が原因で起こるものではありません。要因を見直し、正しく福祉用具を使用し、大きな事故やけがの防止になればと思います。



～おすすめ商品のご案内～

レンタル可能

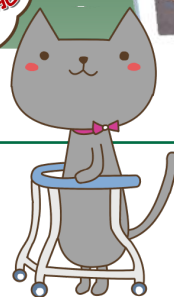

シヨク

SA手すり

- 「U字補助手すり」をしっかりつかむことで、転倒予防につながります
- 「便器までの移動」→「方向転換」→「便器からの立ち上がり」など一連の動作を補助
- 「U字補助手すり」は左右の付け替えが可能

TAISコード:01235-000225 品番:R627-060

その他さまざまなトイレ用手すりがございますので、お客さまの環境に合わせてお選びください。

お気軽に
ご相談ください。

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>